

# SOMMAIRE

## BRAYDEN - ADULT & CHILD

**P.3** 

MANNEQUIN DE RCP ADULTE & ENFANT

**BRAYDEN ADULTE** 

**BRAYDEN JUNIOR** 

**BRAYDEN PRO** 

**TARIFS** 

## **BRAYDEN BABY**

**P.5** 

MANNEQUIN DE RCP NOURISSON

**BRAYDEN BABY** 

**BRAYDEN BABY PRO** 

**TARIFS** 

## **BRAYDEN ONLINE**

**P.7** 

APPLICATION MULTI-PLATEFORME POUR BRAYDEN PRO



BRAYDEN ADULTE KIT DE CONVERSION BRAYDEN JUNIOR

Le mannequin BRAYDEN permet l'apprentissage des gestes de la RCP de façon ludique et intuitive.

Sa conception permet à la fois la réalisation du boucheà-bouche (bascule de la tête, pincement de nez) et de l'insufflation au ballon. Le volume et le débit d'air nécessaire pour soulever le torse lors des insufflations oronasales est tout simplement le plus (seul?) réaliste du marché.

Les retours en temps réel grâce à des indicateurs lumineux permettent à l'apprenant d'ajuster ses gestes et d'améliorer ses performances.






Dimensions (LxHxP): 32cm x 59cm x 21cm

**Poids**: 3,2 kg

LUMIERE INDIQUANT LA QUALITÉ DE LA RCP

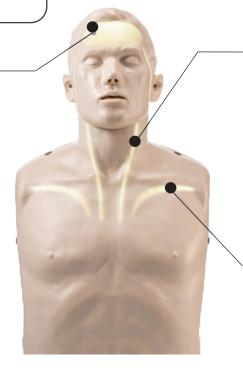

LUMIERES INDIQUANT LA CIRCULATION SANGUINE





Respecte les directives de l'ERC et de l'AHA 2015 **LUMIERES INDIQUANT** LES COMPRESSIONS **THORACIQUES** 

## OUVERTURE DES VOIES RESPIRATOIRES PINCEMENT DU NEZ





## **VENTILATION**



MATERIAU HYPOALLERGENE




**RETOUR SONORE** 



JUSQU'A 1000 000 COMPRESSIONS



## **BRAYDEN JUNIOR**

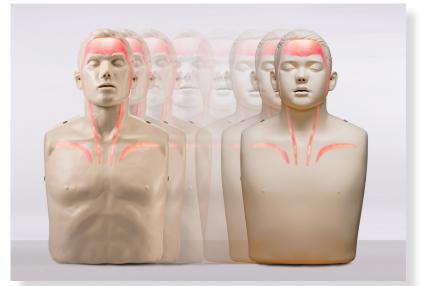

## Un seul mannequin pour vivre 2 expériences

Le **kit de conversion BRAYDEN JUNIOR** transforme

votre mannequin Brayden adulte en version enfant

en seulement quelques secondes et à moindre coût .



## FACILE À TRANSFORMER

Transformez un mannequin adulte Brayden en version enfant en quelques secondes



## ECONOMIQUE

Un seul mannequin suffit pour travailler la réanimation cardio-pulmonaire adulte et infantile.



#### ANATOMIE RÉALISTE

Le kit Brayden Junior se compose d'un visage, d'un plastron et d'un ressort pour un rendu réaliste et immersif.



#### CONFORME

Conforme aux recommandations de l'AHA (American Heart Association) et de l'ERC (European Resuscitation Council)



Le mannequin Brayden OBI offre une représentation d'un homme noir adulte avec des caractéristiques anatomiques réalistes pour une formation précise à la ventilation et à la compression. Cette nouvelle version permet d'améliorer la confiance des apprenants en leur apportant une meilleure connaissance et compréhension des diverses anatomies.











## **BRAYDEN PRO**

**L'application mobile BRAYDEN Online** (disponible sous IOS et sur le navigateur Chrome) permet l'enregistrement des données de la RCP (taux et rythme de compression, position des mains, volume et pression de la ventilation, rythme et profondeur de compression thoracique) pour une analyse en temps réel ou a posteriori de la performance réalisée.

Possibilité de connecter jusqu'à 6 mannequins simultanément pour les formations de groupe.




Désignation	Référence	Tarif € HT	Tarif €TTC
Mannequin Brayden avec Indicateurs Lumineux (coul.rouge)	INN-IM13R	395,00	474,00
Mannequin Brayden OBI avec Indicateurs Lumineux (coul.rouge)	INN-IM13RO	395,00	474,00
Kit de Conversion du Mannequin Brayden en Brayden Junior	INN-IM13J	100,00	120,00
Mannequin Brayden Pro avec Indicateurs Lumineux (coul. rouge)	INN-IM16R	995,00	1 194,00

## BRAYDEN BABY- MANNEQUIN NOURRISSON DE RCP

Le mannequin Brayden Baby est la référence actuelle en terme d'enseignement de la RCP sur nourisson. Il a été conçu avec l'aide d'experts internationaux pour répondre aux directives en vigueur et offrir une mise en situation la plus réaliste qui soit.

Les lumières sur le mannequin donnent un retour intuitif et en temps réel sur la qualité de la RCP. Elles aident l'apprenant à appliquer la bonne technique de ventilation pour un nourrisson et à effectuer des compressions thoraciques en accord avec les recommandations actuelles (ERC et AHA).

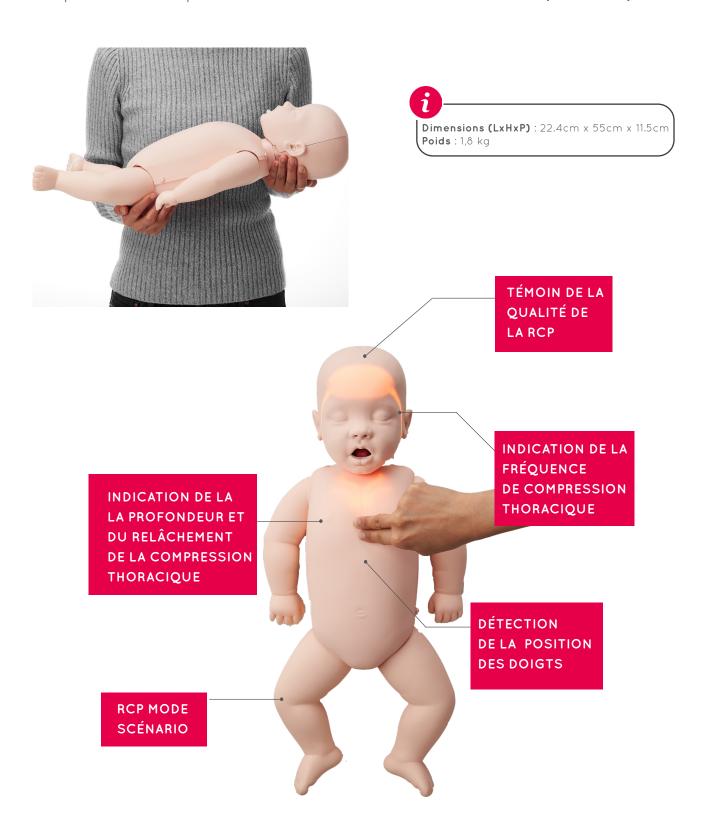

L'apparence physique et anatomique du bébé BRAYDEN aide à créer un environnement immersif pour l'entraînement à la RCP sur le nourrisson qui est différente de celle pratiquée sur l'adulte ou l'enfant.



La peau du Brayden Baby est lisse et douce comme celle d'un nourrisson



Brayden Baby a une bouche et un nez interconnectés ce qui ajoute du réalisme lors de la ventilation



Positionnez correctement la tête en position neutre pour ouvrir les voies respiratoires



Une manoeuvre réaliste de «poussée de la mâchoire/ élévation» est possible



Occlusion réaliste respiratoires chez un nourrisson lorsque la tête est en hyper extension



Brayden Baby permet une profondeur de compression correcte



Brayden Baby a un occiput de taille réelle qui positionne correctement la tête



Brayden Baby dispose d'un double filtre facile à changer, connecté au poumon en cas de besoin



Livré avec sa valise de transport, il est facilement transportable et toujours bien rangé.

## **BRAYDEN BABY PRO**



#### Permet l'activation du pouls (bras gauche)

L'application mobile BRAYDEN Online (disponible sous IOS et sur le navigateur Chrome) permet l'enregistrement des données de la RCP (fréquence, profondeur et relâchement de la compression thoracique, position des mains, volume de ventilation) pour une analyse en temps réel ou a posteriori de la performance réalisée.

Possibilité de connecter jusqu'à 6 mannequins simultanément.

Désignation	Référence	Tarif €HT	Tarif €TTC
Mannequin Brayden Baby avec indicateurs lumineux	INN-IM17	870,00	1044,00
Mannequin Brayden Baby Pro avec Indicateurs lumineux	INN-IM17-P	1070,00	1 284,00

## BRAYDEN ONLINE- APPLICATION MULTI-PLATEFORME POUR BRAYDEN PRO

**L'application mobile BRAYDEN Online** (disponible sous IOS et sur le navigateur Chrome) permet l'enregistrement des données de la RCP (taux et rythme de compression, position des mains, volume et pression de la ventilation, rythme et profondeur de compression thoracique) pour une analyse en temps réel ou a posteriori de la performance réalisée.

Possibilité de connecter jusqu'à 6 mannequins simultanément pour les formations de groupe.




#### MESURE DE LA PROFONDEUR ET DE LA VITESSE DE COMPRESSION

## PROFONDEUR ET VITESSE DE COMPRESSION AU FIL DU TEMPS

Aide l'apprenant à effectuer des compressions à la bonne profondeur, au bon rythme (vitesse) et avec le bon recul entre les compressions.

## PROFONDEUR ET VITESSE DE COMPRESSION GLOBALE

Permet de visualiser toutes les compressions thoraciques par cucle.

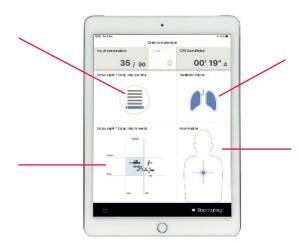

#### **VOLUME DE VENTILATION**

Permet un retour d'information en temps réel sur les performances de la ventilation selon le volume d'air correctement délivré.

#### POSITION DES MAINS

Fournit un retour d'information en temps réel sur la position de des mains et fournit une indication (lumière rouge) lorsque la position est incorrecte.

## DES RAPPORTS COMPLETS POUR AMÉLIORER VOS DEBRIEFINGS



#### ANALYSE DES PERFORMANCES

 Score et résumé illustrés de chaque paramètre mesuré par rapport à un score théorique parfait, afin de mettre en évidence les besoins d'amélioration.



## SYNTHÈSE DES PERFORMANCES

 Informations pertinentes pour chaque paramètre mesuré de la RCP afin d'améliorer les performances.



#### **ANALYSE APPROFONDIE**

- Analyse détaillée de tous les paramètres afin de fournir un résumé approfondi des performances.
- Des données supplémentaires spécifiques à la ventilation peuvent être affichées pour la formation pédiatrique et infantile.



#### **RÉSULTATS PAR CYCLE**

 Analyse des performances de chaque paramètre mesuré par cycle de RCP effectué.



Le pouls brachial du mannequin (bras gauche) simule la nécessité d'une réanimation cardio-pulmonaire chez un nourrisson bradycarde.

Les poumons illuminés évaluent l'efficacité du volume et de la vitesse de ventilation.

### GÉREZ VOS FORMATIONS À DISTANCE

Brayden Online offre désormais la possibilité d'organiser vos cours de RCP à distance:

- Visualiser les techniques de compression et de ventilation des apprenants par le biais d'un flux en direct
- Possibilité de **commenter et de corriger en direct** les apprenants
- Accéder à des debriefing des performances en temps réel, des analyses approfondies et des rapports complets
- Intégrer les résultats des apprenants dans votre système de gestion de vos cours Learning Management System (LMS)
- Formation personnalisable pour répondre aux besoins de programmes pédagogiques ou aux exigences individuelles des étudiants
- Importation d'enregistrements d'utilisateurs et exportation des résultats de l'utilisateur





RETOUR SOMMAIRE P. 8









